

Aloclair®

Gel na dětské dásně

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CZ

Pro úlevu od bolesti při prořezávání prvních zoubků

Určení:

Aloclair® gel na dětské dásně je orální gel, určen pro zmírnění diskomfortu a bolesti spojených s prořezáváním prvních zubů. Aloclair® gel na dětské dásně rychle vytváří ochrannou bariéru, která pomáhá zmírnit bolest a diskomfort při prořezávání prvních zoubků. Aplikátor je opatřen silikonovými štětkami, které jemně masírují bolavé a podrážděné dásně a podpoří tak úlevu od bolesti během aplikace. Díky tomu je použití gelu příjemnější pro děti a jednodušší pro rodiče. Aloclair® gel na dětské dásně má příjemnou banánovou chuť. Aloclair® gel na dětské dásně neobsahuje laktózu, cukr, alkohol a lokální anestetika.

Návod k použití:

Odšroubujte uzávěr, vytlačte množství gelu o velikosti hrášku a držte tubu stlačenou. Naneste gel na postiženou oblast a jemně aplikátorem masírujte dásně. Při opětovné aplikaci před použitím prostředku odstraňte čistými suchými rukama zaschlé zbytky z aplikátoru. Vytvoření ochranného filmu a prodloužení doby úlevy od bolesti u dětí podpoříte tak, že gel aplikujete nejlépe po jídle nebo před spaním. Používejte dle potřeby 3-4x denně. Po každém použití uzavřete šroubovací víčko aplikátoru. Aloclair® gel na dětské dásně je vhodný pro použití u dětí starších 3 měsíců.

Mějte na paměti, že každé dítě je jiné a i k prořezávání zubů může docházet u každého dítěte trochu jinak. Zde je obvyklé schéma prořezávání zubů.



- A** 5 – 7 měsíc
Jako první se prořezávají dolní řezáky, tzv. jedničky
- B** 6 – 8 měsíc
Následují horní přední řezáky
- C** 9 – 11 měsíc
Druhé horní řezáky, tzv. dvojky

- D** 10 – 12 měsíc
Druhé spodní řezáky
- E** 12 – 16 měsíc
Se objevují první stoličky
- F** 16 – 20 měsíc
Rostou špičáky
- G** 20 – 30 měsíc
Se prořezávají druhé stoličky

Složení:

Voda, PVP (12%), maltodextrín, propylenglykol, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, extrakt z listů aloe barbadensis, extrakt z šafránu setého, xanthanová guma, aroma, sorban draselný, benzoát sodný, hyaluronát sodný (0,1%), xylitol, sodná sůl EDTA, cetylpyridiniumchlorid, kyselina glycyrrhetinová.

Kontraindikace, varování a bezpečnostní upozornění:

Pro vyloučení rizika křížové kontaminace aplikátoru a gelu používejte vždy otevřenou tubu Aloclair® gel na dětské dásně pouze u jednoho pacienta. Použití Aloclair® gel na dětské dásně je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku. Nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo kojíte. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Přípravek by měla aplikovat dospělá osoba. UPOZORNĚNÍ:** Výrobek není hračka! **NIKDY** ho nenechávejte dětem v rukou. Předjedete tak riziku možného udušení. Před použitím zkontrolujte, zda prostředek není poškozen nebo nejeví známky používání. V průběhu aplikace věnujte pozornost jednotlivým částem aplikátoru a zkontrolujte, zda nedošlo k jejich náhodnému uvolnění. V takových případech přestaňte přípravek používat. Nesnažte se znovu sestavit oddělenou část. Nepoužívejte, pokud je tuba otevřená nebo poškozená. Jakékoliv závažné nežádoucí účinky nebo kvalitativní nedostatky přípravku by měly být nahlášeny výrobci. K tomuto účelu použijte emailovou adresu pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Závažné nežádoucí účinky, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním přípravku by měly být nahlášeny také Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Obsah: 10ml E tuba. Uchovávejte při teplotě mezi 5°C až 25°C. Ukončete používání přípravku, jakmile je obsah tuby vypotřebován. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Aloclair®, Alliance a související prostředky jsou registrované ochranné známky společnosti Alliance Pharmaceuticals Limited.



Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road, Chippenham,
Wiltshire SN15 2BB, Velká Británie



Distributor v ČR:
NextForce a.s., Pardubická 528,
537 01 Chrudim, Česká republika



CE 1282



Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 XOCT, Irsko



Zdravotnický prostředek

www.alliancepharmaceuticals.com



TR3203184
Rev 1: 2024-07