

Aloclair[®] PLUS gel

CZ

INFORMAČNÍ LETÁK

Aloclair Plus gel vytváří v ústní dutině protektivní film, který chrání odhalená nervová zakončení v lézích (aftech). Tím zamezuje dalšímu dráždění a ulevuje od bolesti. Hyaluronová kyselina (s vysokou molekulární hmotností) podporuje přirozené hojení postižených oblastí.

INDIKACE

Aftózní vřídky, aftózní stomatitida, drobná poranění v ústech, včetně poranění způsobených rovnátkou, špatně sedícím umělým chrupem či poraněním po chirurgickém zákroku. Aloclair Plus gel je vhodný pro použití u dospělých i dětí - od 2 měsíců věku.

SLOŽENÍ

Voda, polyvinylpyrrolidon (PVP), maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, xanthanová guma, sorban draselný, benzoan sodný, hyaluronát sodný, aroma, benzalkonium chlorid, EDTA, sacharin sodný, glycyrrhizát draselný, aloe barbadensis.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po dobu alespoň 2 minut. Po každém použití zavřete víčko. Použijte 3-4 krát denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte ani nepijte.

UPOZORNĚNÍ

Aloclair Gel nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku. Jednu tubu Aloclair Plus gel by měla používat vždy jen jedna osoba, aby nedošlo ke zkřížené kontaminaci aplikátoru či gelu.

VAROVÁNÍ

Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojové teploty, mimo zdrojů tepla. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud trpíte afty opakovaně a často, konzultujte svůj stav s Vaším lékařem.

ALOCCLAIR ® Alliance a související označení jsou ochranné známky Alliance Pharma PLC group.

 Alliance Pharma S.r.l. Viale Restelli 5, 20124 Milán, Itálie

Distributor v ČR: NextForce a.s., Pardubická 528, 537 01 Chrudim, Česká republika
Zdravotnický prostředek.

Poslední revize textů: 05.2021

Obsah: 8 ml

 ALLIANCE

C E0477